

Micro 10⁺



Tüm dental ve cerrahi aletlere yönelik dezenfeksiyon, temizlik ve bakım.



Frezleri, kök kanal aletlerini, forsepleri, problemleri, ayna ve benzerlerini de kapsayan tüm dental ve cerrahi aletlerin ön sterilizasyonuna ve temizliğine yönelik ekonomik, aldehitsiz, konsantre bir solüsyondur. Micro 10⁺, geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Hem ıslatma tankında hem de ultrasonik temizleyicide kullanılabilir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Çok ekonomiktir, %2'lik oranda seyreltilir.
- Temas süresi: 15 dakikadır.
- Tüm aletler için uygundur.
- Aletleri paslanmaya karşı korumak için pas önleyici içerir.
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur.
- VAH/DGHH sertifikalarına sahiptir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com


UNIDENT
SWISS

Micro 10⁺


Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.

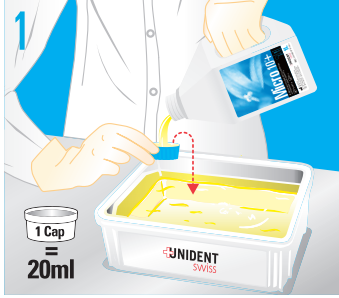

%2 oranda Micro 10⁺'ı tankta seyreltin. (her 1 litre su için 20ml).

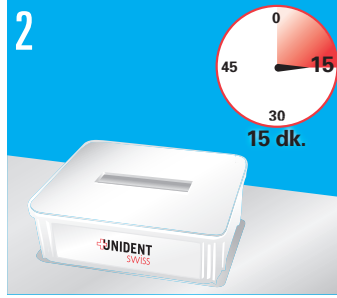


Aletleri solüsyona batırın ve 15 dakika bekletin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekirse görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz bir suya batırıp çıkararak durulayın.

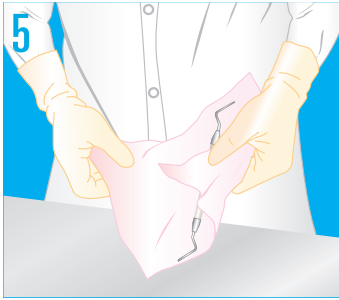

Aletleri temiz bir kâğıt havlu ile kurulayın. Paketleyin ve sterilizasyona hazırlayın.

Tavsiye edilen seyreltiler

Tüm dental aletler için %2 (1Lt su için 20ml)


3-8 dakikalık ultrasonik temizlik için %5 (1Lt su için 50ml).

50°C ye kadar ısıyı destekler.

Küçük aletler için, %10(1Lt su için 100ml)

örneğin kanal aletleri, elmas frezler vb.

Etkinlik

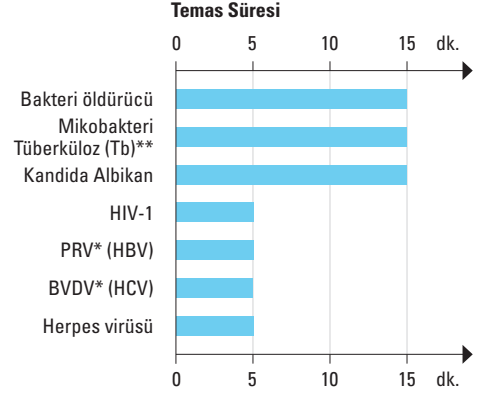

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

** %5'lik Seyreltili

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartları ile uyumludur

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün Bileşenleri

100 gr Micro 10⁺ + 9 gr alkil dimetilbenzilamonyum klorür, amfoterik ve iyonik olmayan surfaktanlar, karışımlar, pas önleyiciler ve katkı maddeleri içerir.

Fiziksel Veriler

Renk: Uçuk sarı

Parfüm: Kokusuz

pH: 7.5 (%2 seyreltilmiş)

Raf Ömrü: Konsantre 3 yıl

Seyreltilmiş, kullanmadan .28 gün

Seyreltilmiş, kullanılmış .7 gün kirlilik miktarına bağlı

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzeme

Ambalaj Biçimi

1Lt	2,5Lt	5Lt
✓	✓	✓

Aksesuarlar

3Lt İslatma Tankı (INTANK)

Frez küveti



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS