

All Surfaces Unisepta®



Tüm yüzeyler için dezenfeksiyon ve temizlik.

Unisepta® All Surfaces dental muayenehanelerin tüm bölümlerinde, zemin, duvar, kapı ve benzeri yerlerde kullanıma yönelik konsantre bir dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonudur.

Ürünün başlıca özellikleri

- %1 oranında seyrelti son derece ekonomiktir.
- Aldehit içermez.
- Tüm geniş yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Renkli yüzeylerde iz bırakmadan kurur.
- Yapışmayan formüle sahiptir.
- Durulamaya ihtiyaç yoktur.
- Sadece 15 dk. içinde mükemmel bir antimikrobiyal performans sergiler.
- Taze narenciye esanslıdır.



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

All Surfaces Unisepta®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.




Unisepta® All Surfaces'i % 1 oranında seyreltin (1 litre su için 10ml).



Zemin temizliği için bir paspas yardımı ile gösterilen şekilde solüsyonu tüm yüzeye eşit bir şekilde dağıtın. Lokal hijyen planına başvurun.



Solüsyon kirlendiğinde dökerek gerektiğinde yeni bir solüsyon hazırlayın.

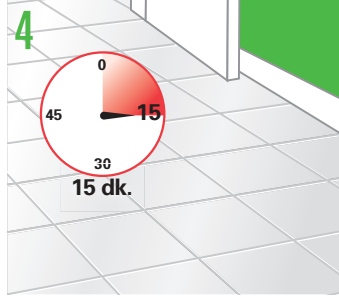

Solüsyonun etki etmesi için en az 15 dk. tüm yüzey tamamen kuruyana kadar bekleyin.



Her bir uygulama sonunda paspası temiz Unisepta® All Surfaces solüsyonunun içinde en az 15 dk.bekletin.

Önlemler

Tehlikelidir. Kullanma talimatına uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).


Biyositleri dikkatli kullanınız. Her kullanım öncesi, etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz. Yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönelik biyosidal bir üründür.

(Grup 1 – PT2).

Etkinlik

Temas süresi

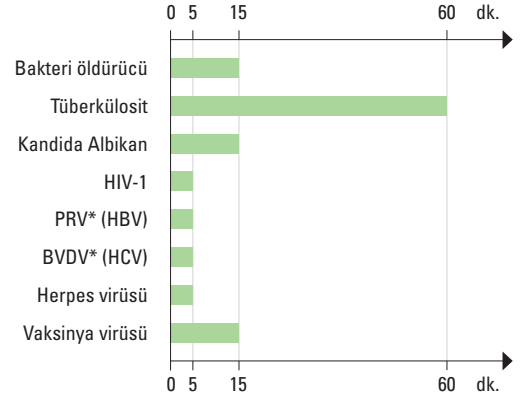

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır
* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13697

Tüberkülo öldürücü: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 1650, EN 13697

Ürün bileşenleri

Unisepta® All Surfaces N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1, 3-diamin (CAS N° 2372-82-9 : 15,3 mgr/gr), didesil dimetilamonyum klorür (CAS N° 7173-51-5: 7,5 mgr/gr) ve katkı maddeleri içerir.

Fiziksel veri

Renk: Yeşil

Koku: Narenciye

pH: Konsantre 10.8

%1 Seyreltildiğinde 9.3

Raf ömrü: Konsantre 2 yıl

Koteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir.

Ambalaj Bilgisi

750ml Sprey	1Lt	2,5Lt	5Lt
		✓	



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS