

■ Foam 2 Unisepta®



Tıbbi cihazların temizliği ve hızlı dezenfeksiyonuna yönelik.

Tıbbi cihaz yüzeylerine yönelik kullanıma hazır dezenfeksiyon ve temizlik köpüğüdür. Unisepta® Foam özellikle dental koltuk döşemeleri gibi alkole karşı hassas bölgeler için uygundur. Unisepta® Foam 2 benzer yüzeylerin kurumasını, çatlamasını veya soyulmasını engelleyerek doğal yumuşaklığını koruyacaktır.

Ürünün ana özellikleri

- Temas süresi 1 - 5 dakikadır
- Alkolsüz olarak formüle edilmiştir
- Materyal uyumluluğu mükemmeldir
- Taze portakal kokuludur
- Disci koltugu temizliği için idealdir
- Leke ve atık bırakmaz
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | Switzerland
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

■ Foam 2 Unisepta®

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Unisepta® Foam 2'ı dezenfekte edilecek ve temizlenecek alana doğrudan uygulayınız.



Dokumasız bir bez kullanarak köpüğü uygulanacak bölgeye eşit miktarda dağıtınız.

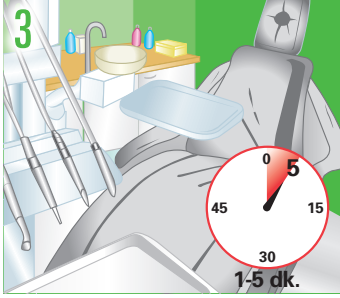

İstenen antimikrobiyal aktiviteyi elde etmek için belirtilen temas süresini dikkate alınız. Mukozaya temas etme ihtimali yoksa tıbbi cihazın durulanmasına gerek yoktur.


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz. Ila sınıfı tıbbi cihaz, CE 1253.

Kullanımdan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza edin.

Etkinlik

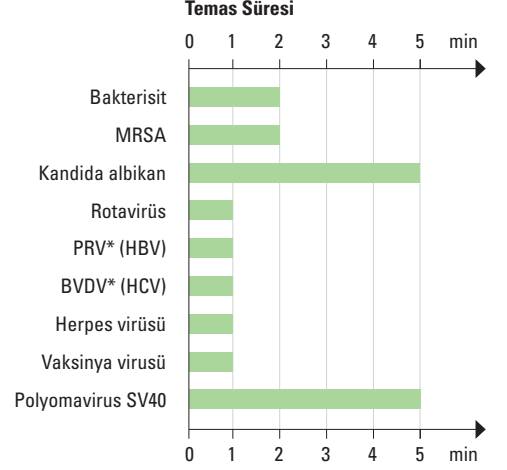

* PRV: Hepatit B taşıyıcısı

* BVDV: Hepatit C taşıyıcısı

Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için sınırlı virüs öldürme aktivitesini artıran dezenfektan kullanılmasını önerir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürme aktivitesi (zarflı virüslere karşı etkili) Vaccinia virüs ve BVDV'ye karşı bir aktiviteye karşılık gelmektedir.

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697

MRSA: EN 13727, EN 13697

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697

Ürün bileenleri

100 g Unisepta® Foam 2 da şunlar bulunur: 0,30 g didesildimetilamonyum klorür, dolgu maddeleri.

Fiziksel veri

Renk: Rensiz

Koku: Taze portakal esansı

Raf ömrü: 2 yıl

Ambalaj: Geri dönüşümlü HDPE materyalden üretilmiştir.

Paketleme

750ml Sprey	1L	2,5L	5L
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS