




# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®

Medikal sistemlerin yüzeylerinin  
dezenfeksiyonu ve çabuk temizlenmesi

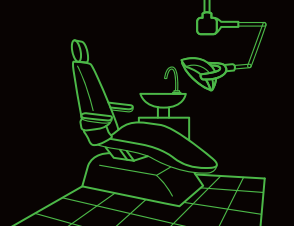

Tıbbi aletlerin temizlenmesi ve çabuk bir şekilde dezenfekte edilmesi için, %100 biyolojik dönüşümlü, kullanıma hazır mendiller.

## Ürünün ana özellikleri

- Alkolsüz formüllü solüsyona batırılmıştır
- Temas süresi: 1 - 5 dakika
- Viskoz mendiller - %100 dönüşümlü
- Parfüm veya diğer herhangi başka bir alerjen madde içermez
- Diş hekimi koltuğunun temizlenmesi için idealdir
- Ebatlar: 180 x 200mm
- Tıbbi aletlere ilişkin 93/42/CE Direktifine uygun olarak CE markasını almıştır
- 100 mendilli paket



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genève | İsviçre  
Tel + 41 22 839 79 00 | Faks + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com  
[www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)

**UNIDENT**  
SWISS

# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®

## Kullanma Talimatı

### Kullanım öncesi

Uygun eldivenler kullanın.



1 Mendili torbasından çıkarın.



2 Mendili temizlenecek yüzeye uygulayın.



İstenen mikrop öldürücü etki için, belirtilen temas süresine uyun. Tıbbi cihazın deri veya mukoza ile temas etme durumu hariç, herhangi bir durulama gerekmez.



4 Her kullanımdan sonra torbanın ağzının iyice kapandığından emin olun.


### Önlemler

Tehlikeli - kullanım talimatlarına uyun. CE 1253 Ila sınıfı medikal sistem.

Kullanımdan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza edin.

## Etkinlik†

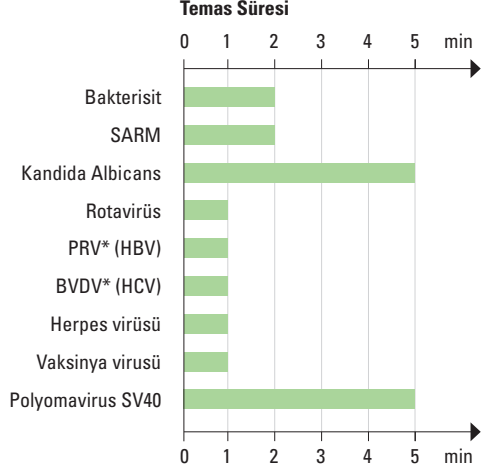

\* PRV: Hepatit B taşıyıcısı

\* BVDV: Hepatit C taşıyıcısı

† Kullanılan solüsyonun etki alanı

Robert Koch (RKI) Enstitüsü, enfeksiyon zincirinin kırılması için, sınırlı virüs öldürücü etkili dezenfektan kullanımını tavsiye etmektedir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürücü etki (zarflı virüsler üzerinde etkili) Vaccinia virüs ve BVDV üzerinde etkiye karşılık gelir.

### Avrupa standartlarıyla uyumlu

Kullanılan solüsyon:

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697

SARM: EN 13727, EN 13697

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697

### Ürün bileenleri

100 g solüsyonda şunlar bulunur: 0,30 g didesil dimetil amonyum klorür, dolgu maddeleri.

### Fiziksel veri

Viskos mendil (dokusuz, örgüsüz spunlace 50gr/m2), %100 çözünümlü hazır mendil.

Renk: Beyaz mendil

Parfüm: Without perfume

Raf ömrü: 2 yıl (açılmadan)

### Paketleme

	100 Mendil	150 Mendil
Paket	✓	



**ECOEngage**  
Our Ecological Engagement



**USF Healthcare**  
Unident • Steridine • Farmec

**UNIDENT**  
SWISS