

Plus Wipes Unisepta®



Tıbbi cihaz yüzeylerine yönelik hızlı dezenfeksiyon mendili.

Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonuna yönelik kullanıma hazır, tek kullanımlık mendillerdir. Unisepta® Plus Wipes'a, Unisepta® Plus solüsyonu emdirilmiştir. Kullanışlı, ekonomik ve geniş bir etkinlik spektrumuna sahiptir. İki hasta arasındaki dezenfeksiyon işlemi için idealdir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 30 saniyedir
- Taze turuncu kokusundadır
- Kalıntı veya iz bırakmaz
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- Unisepta® Plus Solüsyonu VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir
- Mendil ebatları 130 x 200mm'dir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Plus Wipes Unisepta®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



1 Mendili yukarı doğru çekerek konteynerden çıkarın ve ani bir çekişle koparın.



2 Mendil biçimindeki dezenfektanı daha önceden temizlenmiş alana uygulayın.

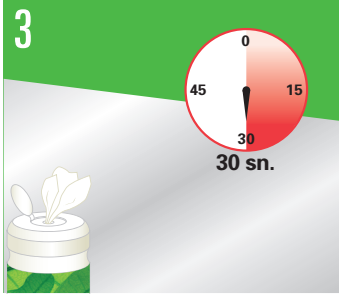

3 Solüsyonun tesir etmesi için en az 30 saniye bekleyin. **Durulamayın!**



4 Her kullanımdan sonra konteynerin güvenli bir biçimde kapatıldığından emin olun.


Önlemler

Tehlikelidir – Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +25°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.

Etkinlik†

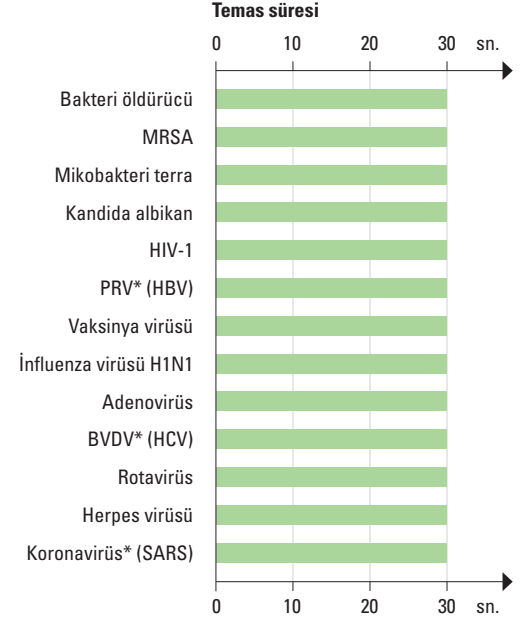

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

† Emilmiş solüsyon etkinliği

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Emilmiş solüsyon için:

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz: EN 14348, EN 14563

Mantar öldürücü: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün bileşenleri

100gr emdirilmiş Unisepta® Plus solüsyonu, 55gr Etanol, 0.11gr didesilmetil oksietilamonyum propiyonat ve esans içerir.

Fiziksel veri

Renk: Beyaz Mendil

Koku: Taze turunç esansı

Raf ömrü: 3 yıl (açılmamış)

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Paketleme

	150 Mendil
Konteyner	✓
Yedek	✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS